

IMD-LABORLEITFADEN

Mikrobiom-Diagnostik

Laborprobe und Anforderungsschein vorbereiten

Untersuchungsmaterial

Das benötigte Material steht auf dem Anforderungsschein direkt hinter der Analyse. Die Abkürzungslegende finden Sie mittig auf der Vorderseite des Anforderungsscheines.

In der Regel reichen 2 Stuhlröhrchen, die zu 2/3 befüllt sind, um alle aufgelisteten Untersuchungen durchzuführen. Für „Hämoglobin“ und „Hämoglobin/Haptoglobin“ benötigen wir ein Spezialröhrchen (HH-ST).

Anforderungsschein

Folgendes muss zwingend mit einem schwarz oder blau schreibenden Stift auf dem Anforderungsschein vermerkt sein:

- ☒ Praxisstempel
- ☒ Datum und Uhrzeit der Stuhlabgabe
- ☒ Unterschrift Therapeut*in oder Behandler*in
- ☒ Patientenunterschrift für die Auftragserteilung
- ☒ Vollständige Patientendaten
- ☒ gewünschte Analysen markieren

Online-Anforderung – Labgate Order Entry


Sie können unsere Analysen auch online über unser Order Entry-System labGate anfordern.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Außendienstmitarbeiterin, wenn Sie Befunde digital anfordern möchten. Auch wenn Sie bereits Labgate nutzen, wird Ihnen unser Außendienst den Mikrobiom-Anforderungsschein in labGate hinterlegen.

Probenentnahme und -beschriftung

Jedes Stuhlröhrchen muss mit einem IMD-Barcodeetikett beklebt sein. Eines der Etiketten enthält die Aufschrift „Schein“, dieses Etikett bitte auf den Anforderungsschein kleben. Überschüssige Etiketten verwerfen.

Bitte achten Sie darauf, dass auf den Stuhlröhrchen das Stuhlentnahmedatum vermerkt ist!

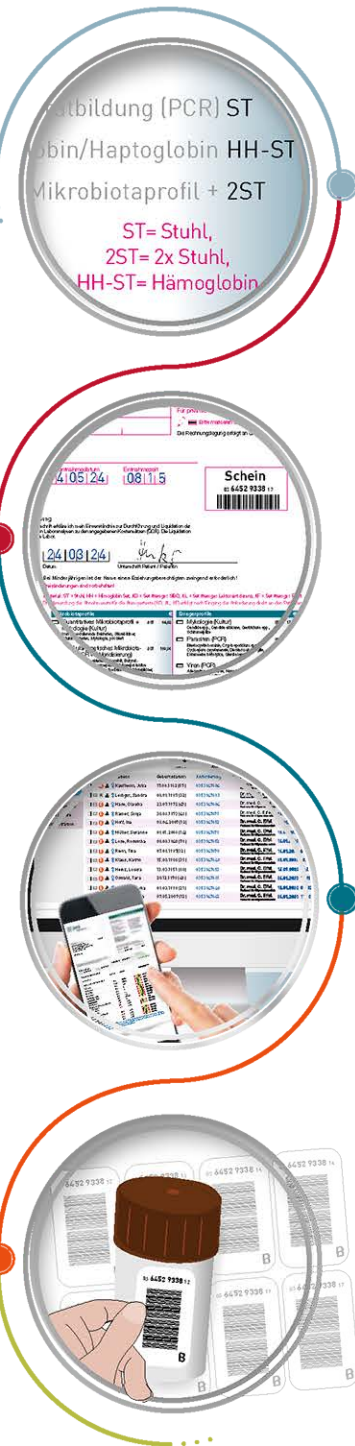

Versand von Stuhldiagnostik per Kurier

Bitte senden Sie keine Stuhlproben per Post ein. **Nutzen Sie für überregionale Abholungen unseren kostenfreien temperaturstabilen Kurier.** Optimalerweise bringen die Patienten die Proben zurück in Ihre Praxis. In Ausnahmefällen können die Proben auch beim Patienten abgeholt werden. Die Proben müssen spätestens 2 Tage (48 Stunden) nach Entnahme im Labor eintreffen, um valide Laborergebnisse zu gewährleisten.

Für die Anmeldung überregionaler Probenabholungen erreichen Sie uns unter:

& + 49 30 77001-450

Innerhalb der Berliner Stadtgrenzen nutzen Sie unseren Berliner Fahrdienst unter:

& + 49 30 7701-250

Die Probenabholung kann von Montag bis Freitag erfolgen.

Alternativ können Patienten in Berlin Ihre Proben auch zu einer unserer Stuhlsammelstellen bringen. Gerne senden wir Ihnen eine aktuelle Übersicht aller Sammelstellen zu.

Der Transport der befüllten Stuhlröhrchen muss in der fest verschlossenen Sicherheitstasche mit Absorber erfolgen.

Bitte prüfen Sie, ob der ausgefüllte **Anforderungsschein im Dokumentenfach auf der Rückseite** der Sicherheitstasche steckt.

Alle befüllten Sicherheitstaschen des Tages in einen undurchsichtigen Kurierbeutel geben, gut verschließen und dem Kurier aushändigen.

Materialbestellung

Anforderungsscheine sowie Entnahme- und Versandmaterial können Sie in unserem Materialbestellshop bestellen:

 <https://materialbestellung.imd-berlin.de>

